

RESILIENCE

Psykiatrian hoitosänky



Sänky psykiatrisille osastoille

Kehitetty yhteistyössä asiantuntijoiden,
suunnittelijoiden ja psykiatrisen sektorin kanssa

AGITEK



Monitoiminen tyyny

Mukavuuselementti potilaalle. Tyynyä voidaan käyttää eri tarpeiden mukaan. Tyyny on jaettu kolmeen eri moduuliin, jotka voidaan koota yhdeksi toisiinsa kytketyksi kokonaisuudeksi.



Hätätilanteet

Sängyn runkoa voidaan käyttää kahvana potilaan fyysiseen hillitsemiseen. Tavallisia kiinnitysvöitä voidaan käyttää kiinnitykseen piilotettujen kiinnityspisteiden avulla. Sängyn muotoilu näyttää enemmän luonnolliselta kuin laitosmaiselta sängyltä.




Pyörät ja jalat

Laitosmaisen ilmeen vähentämiseksi hissimekanismit ja pyörät ovat piilossa. Hätätapauksessa on mahdollista muutamassa sekunnissa muuttaa sänky liikkuvasta (pyörillä) vakaaseen (jaloilla). Henkilöstön kaukosäädin mahdollistaa etupyörien yhdensuuntaisen lukituksen.



Korkeuden säätö ja patja


Sänky tarjoaa ala-asennossa mukavuutta istumiseen. Henkilöstöllä on pääsy kaikkiin toimintoihin oman kaukosäätimensä kautta. Potilas pystyy säätämään makuuasentoa omalla kaukosäätimellä. CPR-toiminto vie sängyn alas perusasentoon..

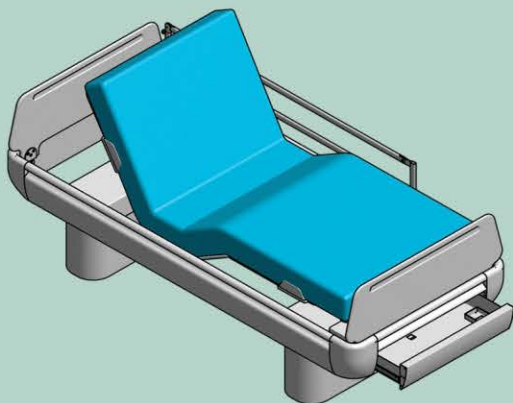

Mitat

Pituus	220 cm
Leveys	98 cm
Korkeus, alin	85 cm
Korkeus, ylin	93 cm
Paino	250 kg
Max. Potilaan paino	250 kg
Patjan koko	205x85x14cm

EN 60601-2-52

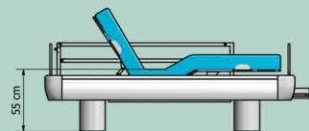

Johdoton sänky

Sängyssä on ladattava akku, joka on vaihdettavissa. Akku on sijoitettuna suljettuun ja lukittuun laatikkoon sängyn jalkaosaan. Laatikko voidaan avata vain siru- tai avainkortilla. Akku on plug-in mallia ja henkilöstö voi helposti vaihtaa sen. Säilytyslaatikkoon on sijoitettu akku sekä kaukosäädin akun varauksen näytöllä. Akkulaturipaneeli sijoitetaan erilliseen huoneeseen.



Turvakiskot ja päädyt

Turvakiskot ja sängynpäädyt voidaan hankkia ja asentaa jälkikäteen. Turvakiskoilla ja päädyillä estetään mm.vahingot toimenpiteiden aikana. Pääty toimii myös kuljetuskahvana.






Turvallinen sänky

Sähköjohdot, hissitoiminnot ja mekaaniset osat ovat piilossa ulkopuolisilta. Sänky on tukeva ja vakaa seisoen 2 isolla jalalla. Vain henkilökunta voi käyttää jalkojen nostotoimintoa tai kytkeä pyörät alle.



Erilliset kaukosäätimet

Sekä henkilökunnalle että potilaalle on oma kaukosäädin, mutta eri toiminnoilla.

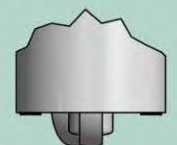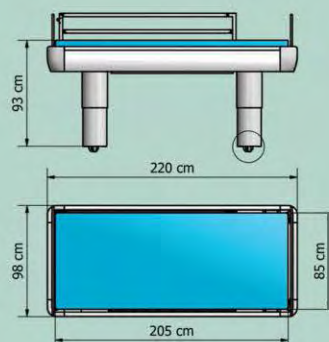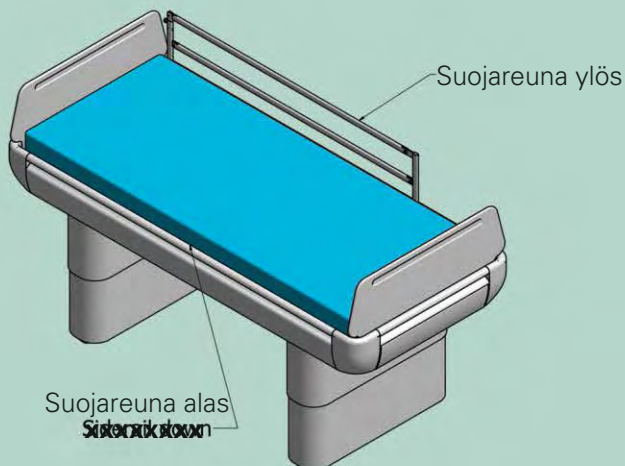

Renkaat ylös

INNOVAATIO JA YHTEISTYÖ

Kehitetty yhteistyössä asiantuntijoiden,
suunnittelijoiden ja
psykiatrisen sektorin kanssa



Näemme RESILIENCE hoitosängyn suurena harppauksena psykiatrian potilaille ja henkilöstölle. Sänky on suunniteltu parantamaan potilaiden hoitorutiineja, mutta samalla myös henkilökunnan työympäristöä. Mielestämme se on oleellista - ja olemme myös saavuttaneet sen tässä kehityshankkeessa.

Torben Kyed Larsen

Anlægschef, Psykiatrien i Syddanmark

KATSO VIDEO AGITEK.DK

Käy verkkosivuillamme ja katso pieni video uuden sängyn ja suunnittelu- ja kehitysprosessista.



www.agitek.dk



NOMINEE
2016

Danish Design Awards ehdokas 2016



AGITEK

Gammelstrupevej 10
8740 Brædstrup
Denmark

+45 7575 2755
info@agitek.dk
www.agitek.dk

tekmala 
MEDICAL

Tekmala Oy
Veikkointie 22, 03100 Nummela
0405011155
info@tekmala.fi www.tekmala.fi